


FastCapture Desktop - Inicialização

O FastCapture XP já vem pronto para o uso não havendo necessidade de muitas configurações. Na verdade basta ligar o cabo de vídeo no painel traseiro e o equipamento está pronto para o uso. Abaixo estão os passos básicos para começar a utilizar o FastCapture.


1-Painel Dianteiro

- 1-Botão Liga Desliga do equipamento .
- 2-Tampa do Gravador de CD/DVD
- 3-Botão de Eject do Gravador de CD/ DVD
- 4-Led indicativo de acionamento do controle remoto e pedal
- 5-Botão de RESET do sistema
- 6-Porta de acesso para entradas USB e de áudio

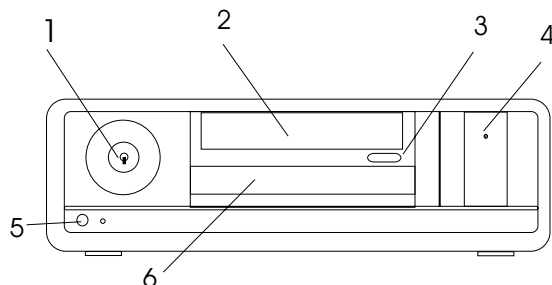

2-Painel Traseiro

- 1- Tomada de entrada de energia 110/220V
- 2- Conector BNC de entrada do SINAL de VÍDEO
- 3- **Chave de Seleção de tensão 110 ou 220V**
- 4- Conectores deversos : USB , Serial , Paralelo , etc..
- 5- Conector P3 do Pedal de captura

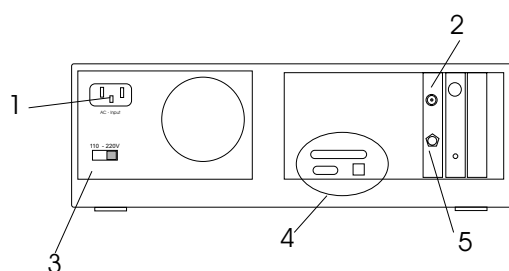

ATENÇÃO : ANTES DE LIGAR O FASTCAPTURE VERIFIQUE SE A TENSÃO AJUSTADA CONFERE COM A TENSÃO DA REDE : 110 OU 220Vca

3- Ligando o sistema :


Ligue o FastCapture e aguarde a inicialização . Clique no Botão Logon para inicializar o WINDOWS. O Programa é inicializado automaticamente.

Para visualizar a imagem clique no menu FOTO e em seguida clique no botão VÍDEO para ativar a exibição da imagem ao VIVO. Caso apareça apenas uma tela AZUL ao ativar o vídeo verifique se o equipamento de vídeo está ligado ou se há mal contato nos cabos de vídeo.



As demais instruções de uso do Fast Capture se encontram no menu AJUDA do programa.

Conexão do sistema de vídeo com uso de monitor auxiliar

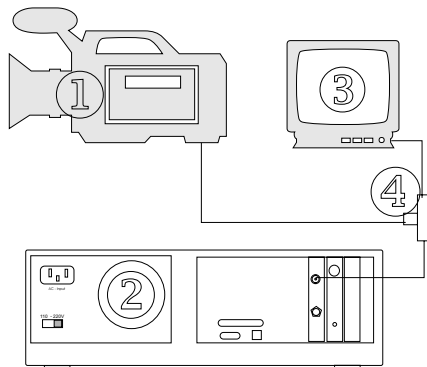

- 1-Sistema de vídeo : Videocoloscópio , endoscópio , micro camera , ultrassom , etc..
- 2-FastCaptrue DeskTop
- 3-Monitor de vídeo auxiliar
- 4-Divisor de vídeo BNC

Conexão do sistema de vídeo direto no FastCapture (sem monitor auxiliar)

